



Atlantis®

# Atlantis® Viewer (App)

- Bedienungsanleitung



# Atlantis®

## INHALT

Überblick	4
Download und Installation	5
Navigation	6
3D-Bilder betrachten	7
Anmerkungen für Designmodifikation senden	9
Fälle freigeben	9
Push-Benachrichtigungen	10
FAQ	11

Alle Marken und Unternehmensnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Einige Produkte sind möglicherweise nicht in allen Märkten zugelassen. Bitte kontaktieren Sie die örtliche Vertriebsniederlassung von Dentsply Sirona Implants, um das aktuelle Produktsortiment und die Lieferbarkeit zu erfragen.

Um die Lesbarkeit für unsere Kunden zu verbessern, verwendet Dentsply Sirona Implants im Text keine Symbole ® oder ™. Dentsply Sirona Implants verzichtet damit jedoch nicht auf irgendwelche Rechte an den Marken, und nichts in diesem Dokument darf in gegenteiliger Weise ausgelegt werden.

# Überblick

Die Atlantis Viewer App für Apple-Geräte (z. B. iPhones und iPads) bietet mobilen Zugang zu Ihren Atlantis-Fällen.


Push-Benachrichtigungen werden an Ihr Gerät geschickt, wenn die Konstruktion eines Atlantis-Abutments oder einer Suprastruktur für die Überprüfung verfügbar ist. Dies ermöglicht Ihnen, 2D- und 3D-Bilder der Atlantis-Fälle zu betrachten, die auf die Designfreigabe warten.

**Hinweis:** 2D- und 3D-Bilder sind nicht für Bestellungen von Atlantis-Suprastrukturen verfügbar.



In dem Bereich „Notes“ (Anmerkungen) der App können Sie Kommentare oder Änderungswünsche für das Konstruktionsteam vermerken. Fälle lassen sich mit einem Klick freigeben.

# Download und Installation

1. Suchen Sie den „Atlantis Viewer“ im App Store auf Ihrem mobilen Gerät und tippen Sie auf das Symbol „INSTALL“, um den Download zu starten.

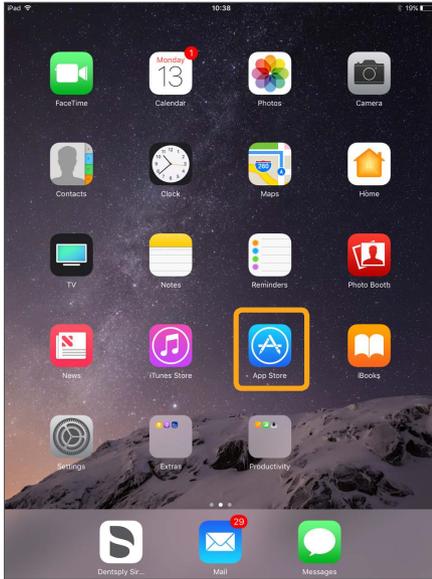


2. Öffnen Sie die App vom Gerätedesktop aus und geben Sie Ihre Zugangsdaten für Atlantis WebOrder ein, um sich einzuloggen.

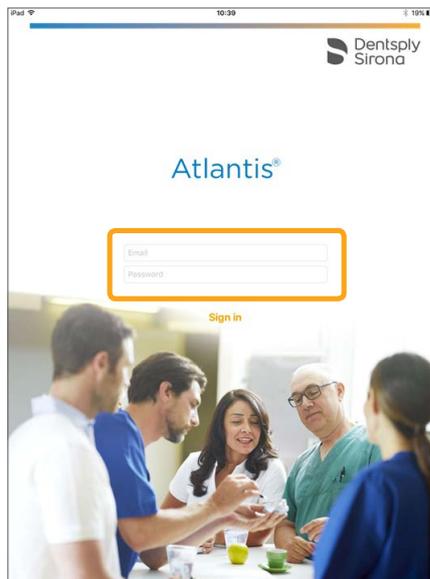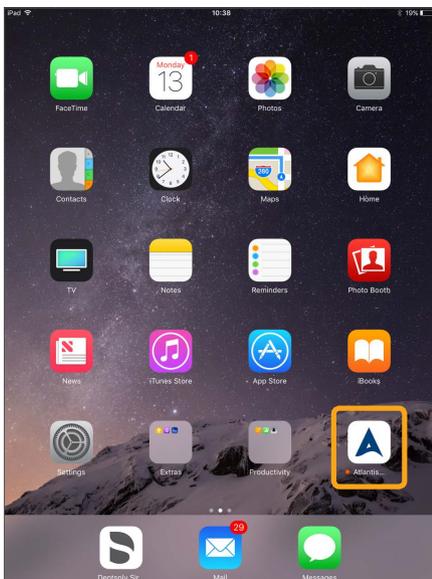

# Navigation

1. Nach dem Einloggen erscheint die Registerkarte „For approval“ (Zur Freigabe). Sie zeigt Ihnen eine Liste der Fälle, die gerade auf die Designfreigabe warten. Um Fälle zu sehen, die unter anderen Statuskriterien aufgeführt sind, verwenden Sie die vier Registerkarten am unteren Bildschirmrand:

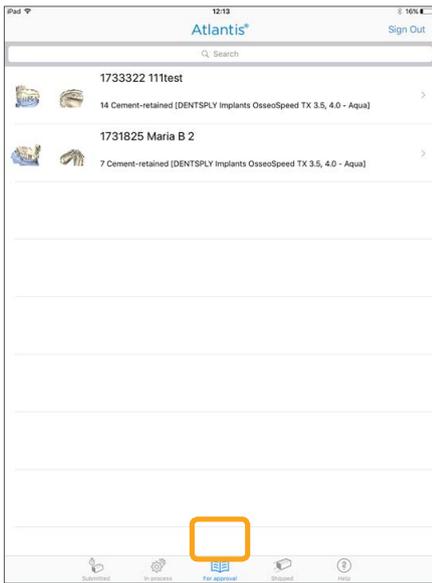

- a. „Submitted“ (Übermittelt): Fälle, die Sie übermittelt haben, jedoch noch nicht von Dentsply Sirona Implants empfangen wurden.
- b. „In process“ (In Arbeit): Fälle, die von Dentsply Sirona Implants empfangen wurden und entweder auf die Konstruktion warten oder gerade gefräst werden.
- c. „Shipped“ (Verschickt): Fälle, die von Dentsply Sirona Implants an Sie verschickt wurden.
- d. „Help“ (Hilfe): Hier können Sie diese Bedienungsanleitung downloaden.


2. Durch Antippen eines Falls gelangen Sie zu einem Untermenü, in dem Ihnen vier verschiedene Registerkarten zusätzliche Details liefern:



- a. „Overview“ (Überblick): Zeigt eine Übersicht des Fallverlaufs und die Art des Falls.
- b. „Notes“ (Anmerkungen): Siehe Kapitel „Anmerkungen für Designmodifikation senden“ (Seite 9).
- c. „2D Images“ (2D-Bilder): 2D-Bilder des Abutment-designs (nur für Atlantis Abutments verfügbar)
- d. „3D Images“ (3D-Bilder): Siehe Kapitel „3D-Bilder betrachten“ (Seiten 7-8).


# 3D-Bilder betrachten

1. Wählen Sie aus der Registerkarte „For approval“ (Zur Freigabe) den Fall, den Sie betrachten möchten, und tippen Sie auf „3D Images“ (3D-Bilder).


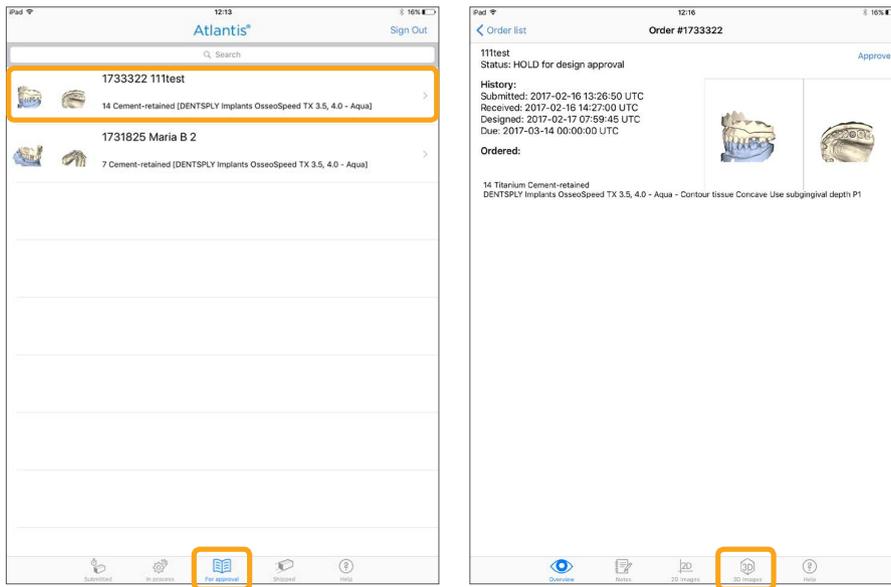


2. Der Fall wird geladen.

**Hinweis:** Es kann bis zu einer Minute dauern, bis das Laden des vollständigen Falls abgeschlossen ist, beginnend mit dem/den Abutment(s) und dann dem/den Modell(en).


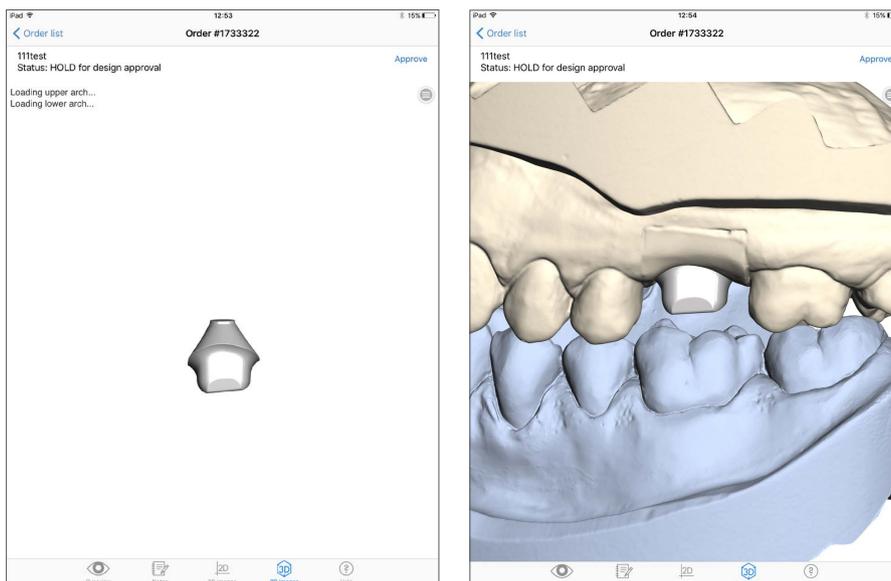


3. Navigieren in den 3D-Bildern:

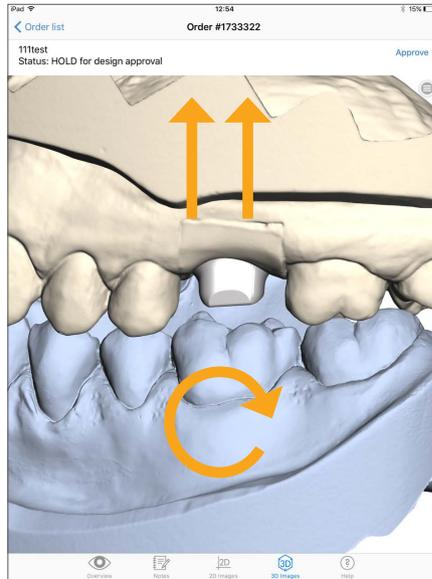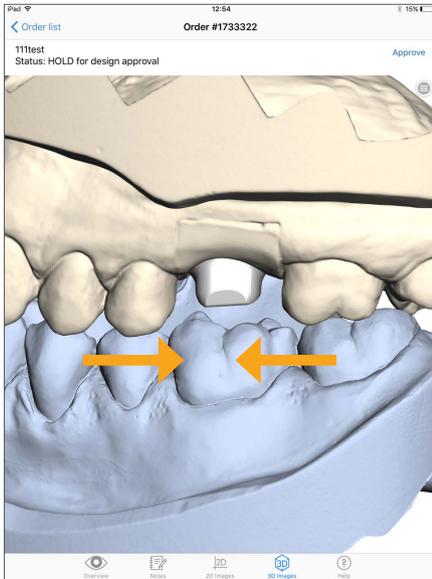

- a. **Zoomen:** Verwenden Sie zwei Finger in einer „Scherenbewegung“, um in das Bild ein- bzw. aus dem Bild auszuzoomen.
- b. **Schwenken:** Verwenden Sie zwei Finger, um das Bild in die Richtung zu bewegen, in die Sie es schwenken möchten.
- c. **Drehen:** Verwenden Sie einen Finger, um das Bild in eine gewünschte Richtung zu drehen.

4. Transluzenz ändern

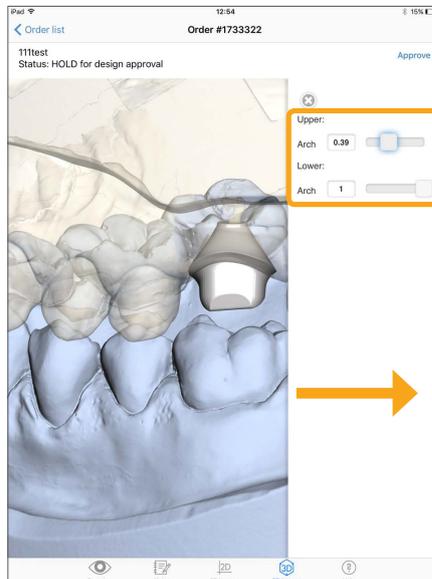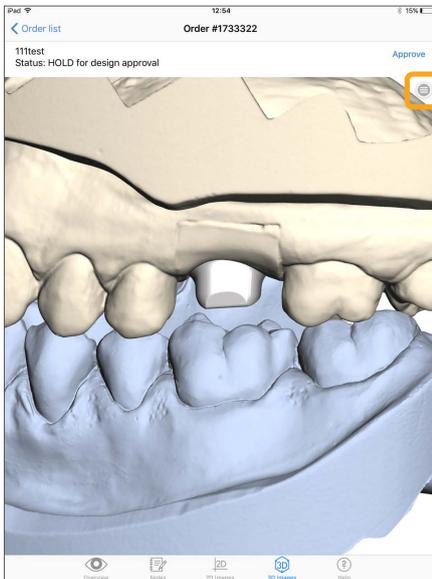

- a. Tippen Sie auf das Symbol in der rechten oberen Ecke. Mit Hilfe von Schiebereglern können Sie die Transluzenz der Wachaufstellung sowie des OK- und UK-Modells zum gewünschten Wert ändern.
- b. Um zum Ansichtsmodus zurückzukehren, wischen Sie das Fenster einfach nach rechts.

**Hinweis:**


- Bearbeiten von 3D-Bildern ist in der App nicht verfügbar. Designmodifikationen müssen im Atlantis Editor durch Einloggen in Ihr Atlantis WebOrder-Konto erfolgen. Anforderungen einer Designmodifikation können an den Atlantis-Konstrukteur auch über die Registerkarte „Notes“ (Anmerkungen) gesendet werden.
- 3D-Bilder sind nicht verfügbar für Atlantis Suprastrukturen.

## Anmerkungen für Designmodifikation senden



Anforderungen von Designmodifikationen können im Abschnitt „Notes“ (Anmerkungen) eingegeben werden. Tippen Sie auf „Add“ (Hinzufügen), um die Anmerkung an den Atlantis-Konstrukteur zu senden.

## Fälle freigeben

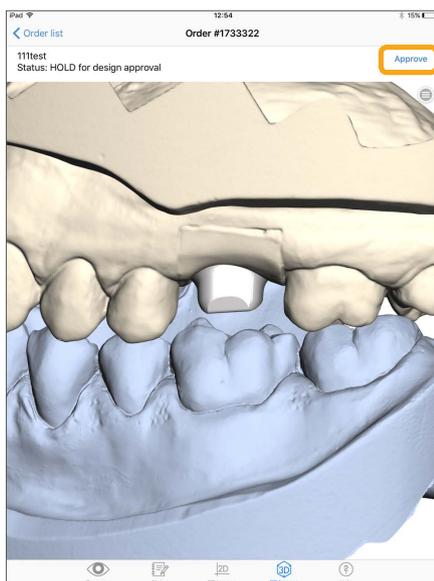



Während der Überprüfung eines Designs ist die Freigabe-Schaltfläche oben auf jeder Status-Registerkarte verfügbar.

**Hinweis:** Mit der Freigabe des Falls startet sofort die Produktion (Fräsen).

# Push-Benachrichtigungen

Sobald ein Fall für die Designfreigabe bereit ist, wird eine Push-Benachrichtigung an Ihr mobiles Gerät geschickt. Das Benachrichtigungs-Symbol erscheint solange, bis Sie den oder die Fälle freigegeben haben.

**Hinweis:** Abhängig von den Einstellungen können die Push-Benachrichtigungen je nach Gerät unterschiedlich angezeigt werden (weitere Informationen siehe „FAQ“, Seite 11).

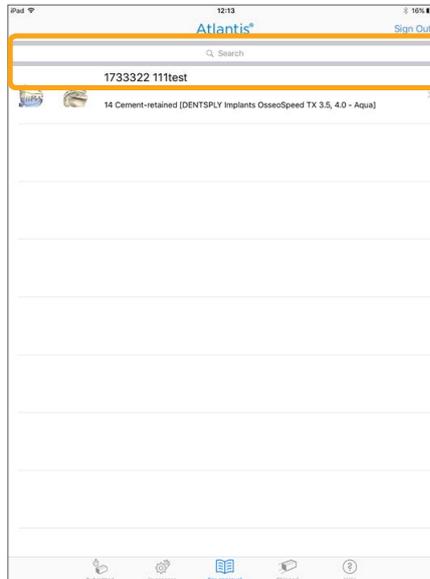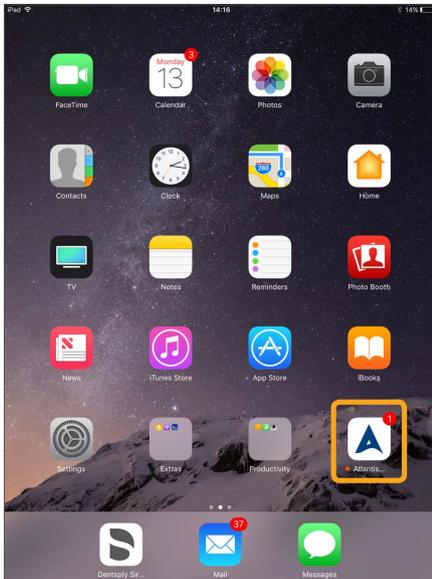

# FAQ

**F:** *Wie bearbeite ich die Abutments?*

**A:** In der App ist keine Bearbeitungsfunktion verfügbar, aber ein Design-Feedback kann in der Registerkarte „Notes“ (Anmerkungen) eingegeben werden, um eine Nachricht an den Atlantis-Konstrukteur zu senden. Wenn irgendwelche Designmodifikationen notwendig sind, loggen Sie sich mit Ihrem PC in Ihr Atlantis WebOrder-Konto ein, um den Atlantis Editor zu verwenden.

**F:** *Wie lade ich die App auf mein Android-Gerät herunter?*



**A:** Der Atlantis Viewer ist kostenlos in Google Play erhältlich.

**F:** *Wenn ich auf 3D-Bilder klicke, passiert nichts. Warum?*

**A:** Abhängig von Ihrer Internetverbindung kann es ca. 10-60 Sekunden dauern, bis das Herunterladen des Falls abgeschlossen ist. Wenn es länger als eine Minute dauert, kontaktieren Sie bitte Ihren Dentsply Sirona Implants Vertriebsmitarbeiter.

**F:** *Warum erhalte ich keine Push-Benachrichtigungen?*

**A:** Prüfen Sie zuerst, ob Ihr Konto in Atlantis WebOrder für den Empfang von E-Mails für Bilder eingerichtet ist. Es muss entweder „All orders entered“ (Alle eingegebenen Aufträge) oder „Orders entered by this user only“ (Nur von diesem Anwender eingegebene Aufträge) aktiviert sein:

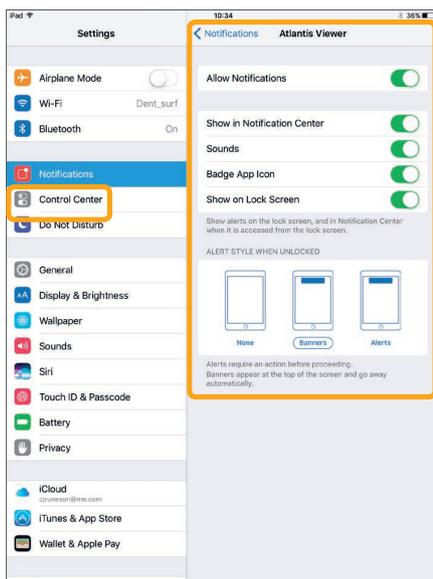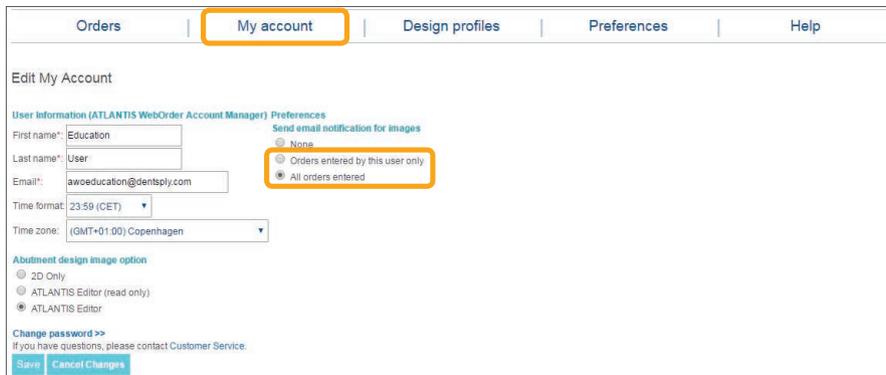

Überprüfen Sie zusätzlich, ob die Benachrichtigungs-Einstellung in Ihrem mobilen Gerät aktiviert ist, in dem Sie zu „Settings“ (Einstellungen) > „Notifications“ (Benachrichtigungen) > „Atlantis Viewer“ gehen.

## Über Dentsply Sirona Implants

Dentsply Sirona Implants bietet umfassende Lösungen für alle Phasen der Implantattherapie an. Dazu gehören sowohl die Implantatsysteme Ankylos®, Astra Tech Implant System® und Xive® als auch digitale Technologien wie patientenindividuelle Lösungen mit Atlantis® sowie Simplant® für die computer-gestützte Implantologie.

Des Weiteren sind regenerative Lösungen mit Symbios®, Programme zur beruflichen Fortbildung und Weiterentwicklung sowie professionelle Marketingleistungen für Praxen und Labore unter der Marke STEPPS™ im Portfolio. Dentsply Sirona Implants schafft einen Mehrwert für Zahnärzte und Zahntechniker und ermöglicht vorhersagbare und dauerhafte Ergebnisse in der Implantatbehandlung, die zu einer höheren Lebensqualität für Patienten führen.

Weitere Informationen über Dentsply Sirona Implants finden Sie unter [www.dentsplysirona.com/implants](http://www.dentsplysirona.com/implants).

**Hersteller:** DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH · Postfach 71 01 11  
68221 Mannheim/Deutschland · Tel. 0621 4302-000 · Fax 0621 4302-001  
E-Mail: [implants-info@dentsplysirona.com](mailto:implants-info@dentsplysirona.com) · [www.dentsplysirona.com](http://www.dentsplysirona.com)

**Vertrieb Deutschland:** DENTSPLY IH GmbH · Postfach 71 01 11  
68221 Mannheim · Tel. 0621 4302-006 · Fax 0621 4302-007  
E-Mail: [implants-de-info@dentsplysirona.com](mailto:implants-de-info@dentsplysirona.com) · [www.dentsplysirona.com](http://www.dentsplysirona.com)

**Vertrieb Österreich:** Dentsply Sirona Europe GmbH · Zweigniederlassung Wien  
Wienerbergstraße 11 / Turm A / 27. Stock · 1100 Wien  
Tel. 01 600 4930-301 · Fax 01 600 4930-381  
E-Mail: [bestellung.austria@dentsplysirona.com](mailto:bestellung.austria@dentsplysirona.com)

**Vertrieb Schweiz:** DENTSPLY IH SA · Rue Galilée 6, CEI 3, Y-Parc  
1400 Yverdon-les-Bains · Tel. 0800 845844 · Fax: 0800 845845  
E-Mail: [implants-ch-info@dentsplysirona.com](mailto:implants-ch-info@dentsplysirona.com)

## Über Dentsply Sirona

Dentsply Sirona ist der weltweit größte Hersteller von Dentalprodukten und -technologien, mit einer 130-jährigen Unternehmensgeschichte, die von Innovationen und Service für die Dentalbranche und Patienten überall auf der Welt geprägt ist. Dentsply Sirona entwickelt, fertigt und vertreibt umfassende Lösungen, Produkte zur Zahn- und Mundgesundheit sowie medizinische Verbrauchsmaterialien, die Teil eines starken Markenportfolios sind.

Dentsply Sirona, The Dental Solutions Company™, liefert innovative und effektive, qualitativ hochwertige Lösungen, um die Patientenversorgung zu verbessern und für eine bessere, schnellere und sicherere Zahnheilkunde zu sorgen. Der weltweite Firmensitz des Unternehmens befindet sich in York (US-Bundesstaat Pennsylvania), und die internationale Zentrale ist in Salzburg (Österreich) angesiedelt. Die Aktien des Unternehmens sind an der NASDAQ unter dem Kürzel XRAY notiert.

Weitere Informationen über Dentsply Sirona und die Produktpalette finden Sie unter [www.dentsplysirona.com](http://www.dentsplysirona.com).