



Atlantis®

Anleitung – Atlantis® Viewer für Android-Geräte

Atlantis®

INHALT

Einführung	4
Download und Installation	5
Navigation	6
3D-Bilder betrachten	7
Anmerkungen für Designmodifikation senden	9
Fälle freigeben	10
Push-Benachrichtigungen	11
FAQ	12

Alle Marken und Unternehmensnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Einige Produkte sind möglicherweise nicht in allen Märkten zugelassen. Bitte kontaktieren Sie die örtliche Vertriebsniederlassung von Dentsply Sirona Implants, um das aktuelle Produktsortiment und die Lieferbarkeit zu erfragen.

Um die Lesbarkeit für unsere Kunden zu verbessern, verwendet Dentsply Sirona im Text keine Symbole ® oder ™. Dentsply Sirona verzichtet damit jedoch nicht auf irgendwelche Rechte an den Marken, und nichts in diesem Dokument darf in gegenteiliger Weise ausgelegt werden.

Produktabbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

Einführung

Die Atlantis Viewer App für Android-Geräte bietet mobilen Zugang zu Ihren Atlantis-Fällen.



Push-Benachrichtigungen werden an Ihr Gerät geschickt, wenn die Konstruktion eines Atlantis Abutments oder einer Suprastruktur für die Überprüfung verfügbar ist, was Ihnen ermöglicht, 2D- und 3D-Bilder der Atlantis-Fälle zu betrachten, die auf die Designfreigabe warten (2D- und 3D-Bilder sind nicht für Atlantis-Suprastrukturen verfügbar).

Mit dem Bereich "Notes" (Anmerkungen) in der App können Kommentare oder Änderungswünsche für das Konstruktionsteam integriert werden. Die Atlantis-Fälle lassen sich mit einem einfachen Klick freigeben.



Bitte geben sie keine Design-Vorschläge zur Produktion frei ohne diese überprüft zu haben.

Hinweis: Auf dem Gerät muss Android Version 5.0 (oder höher) installiert sein.

Download und Installation

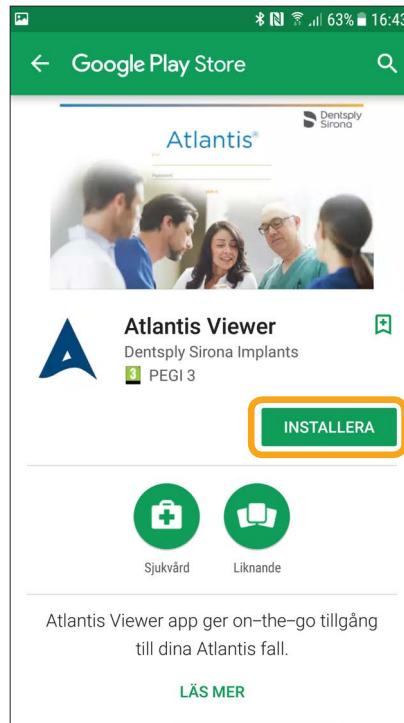
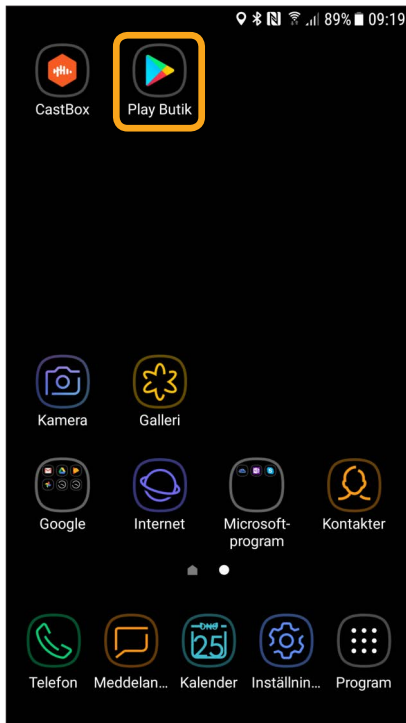


1. Suchen Sie die Atlantis Viewer App im „Play Store“ auf Ihrem mobilen Gerät und tippen Sie auf das Symbol „INSTALL“, um den Download zu starten.

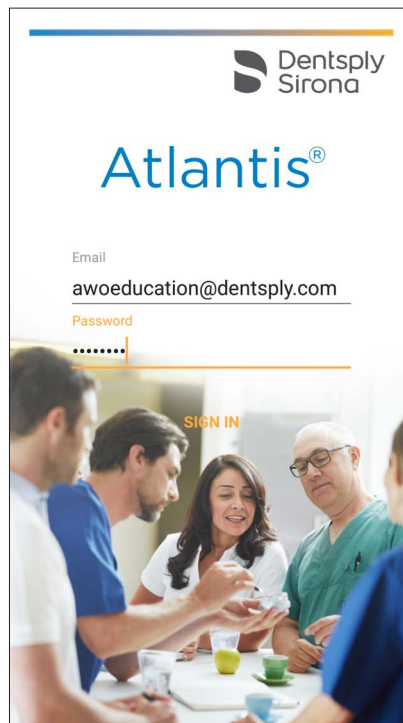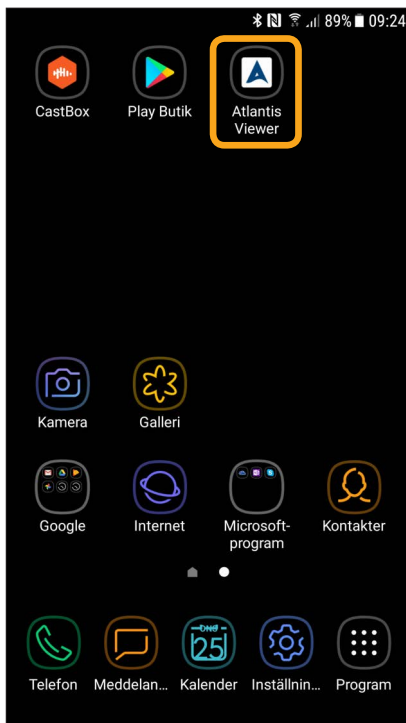



2. Öffnen Sie die App vom Gerätedesktop aus und geben Sie Ihre Zugangsdaten für Atlantis WebOrder ein, um sich einzuloggen.

Navigation

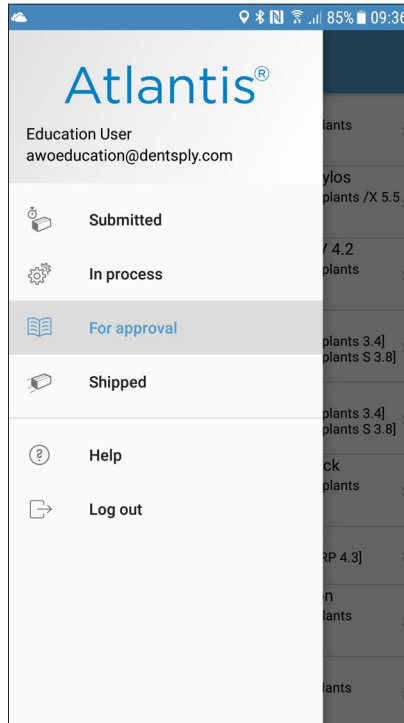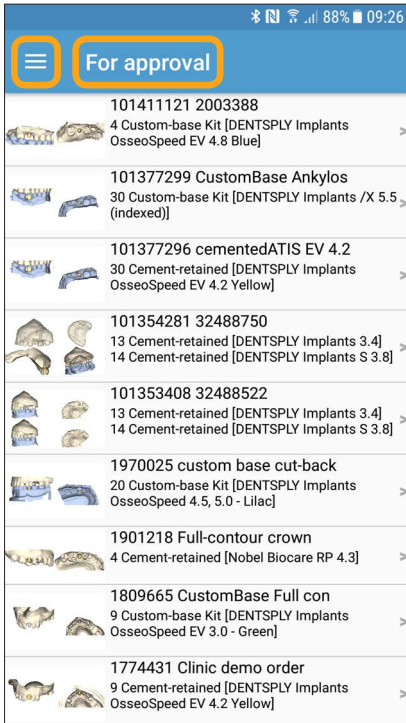

1. Nach dem Einloggen erscheint die Registerkarte „For approval“ (Zur Freigabe) und zeigt Ihnen eine Liste der Fälle, die gerade auf die Designfreigabe warten. Um die Fälle zu sehen, die unter einem anderen Status aufgelistet sind, verwenden Sie das Menü links:



- a. „Submitted“ (Übermittelt): Fälle, die Sie übermittelt haben, aber von Dentsply Sirona Implants noch nicht empfangen worden sind.
- b. „In process“ (In Arbeit): Fälle, die von Dentsply Sirona Implants empfangen worden sind und entweder auf die Konstruktion warten oder gerade gefräst werden.
- c. „Shipped“ (Verschickt): Fälle, die Dentsply Sirona Implants bereits an Sie verschickt hat.
- d. „Help“ (Hilfe): Hier können Sie diese Bedienungsanleitung downloaden.

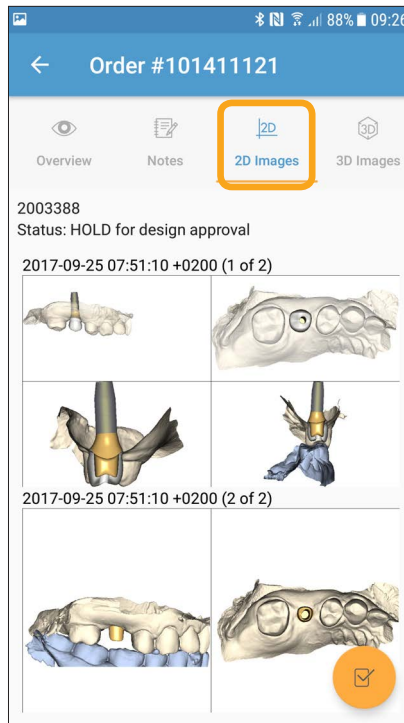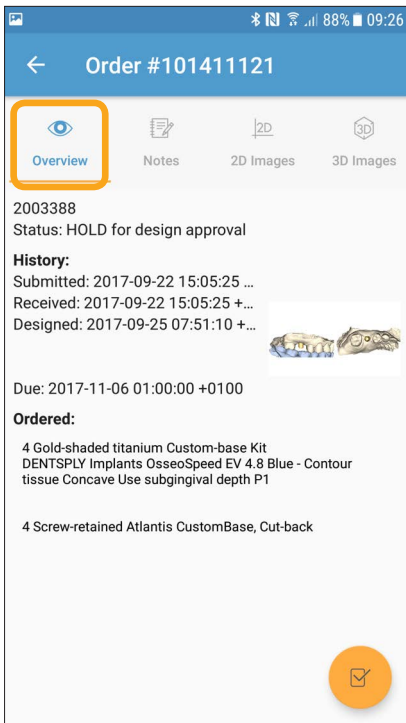

2. Durch Antippen eines Falls gelangen Sie zu einem Untermenü, wo Ihnen vier verschiedene Registerkarten zusätzliche Details liefern:


- a. „Overview“ (Überblick): Zeigt eine Übersicht des Fallverlaufs und die Art des Falls.
- b. „Notes“ (Anmerkungen): Siehe Kapitel „Anmerkungen für Designmodifikation senden“ (Seite 9).
- c. „2D Images“ (2D-Bilder): 2D-Bilder des Abutmentdesigns (nur für Atlantis Abutments verfügbar).
- d. „3D Images“ (3D-Bilder): Siehe Kapitel „3D-Bilder betrachten“ (Seiten 7-8).

3D-Bilder betrachten

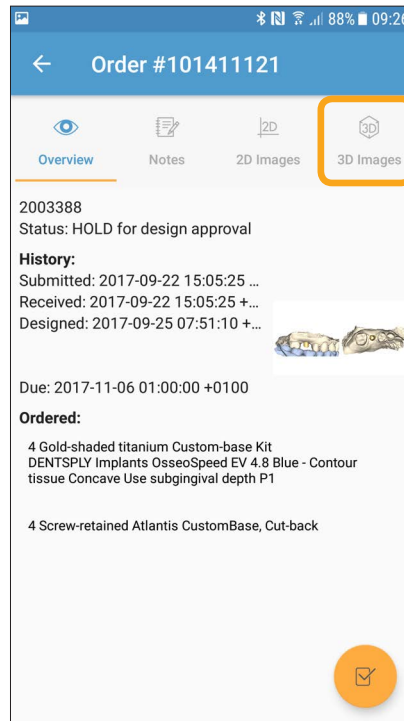
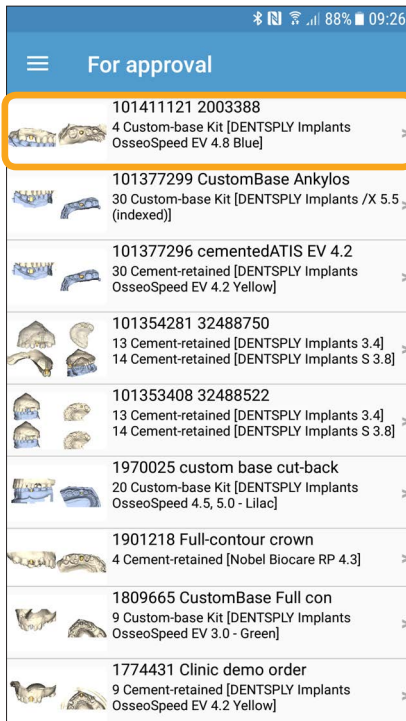


1. Wählen Sie aus der Registerkarte „For approval“ (Zur Freigabe) den Fall, den Sie betrachten möchten, und tippen Sie auf „3D Images“ (3D-Bilder). Der Fall wird geladen.

Hinweis: Es kann bis zu einer Minute dauern, bis das Laden des vollständigen Falls abgeschlossen ist, beginnend mit dem/den Abutment(s) und dann dem/den Modell(en).


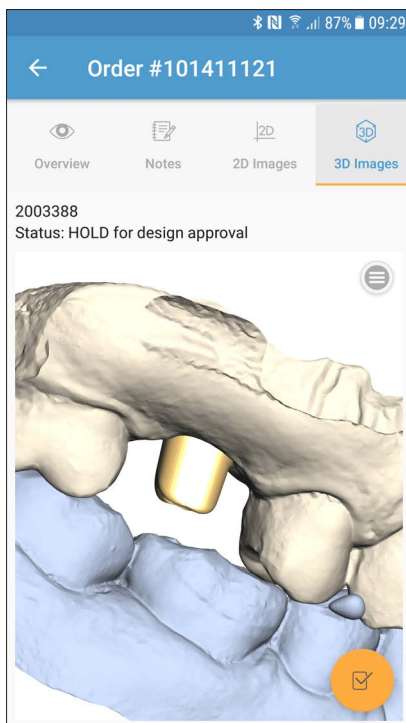


3D-Bilder betrachten

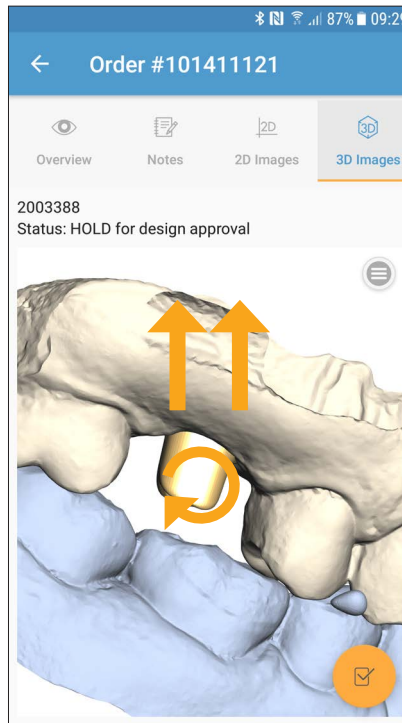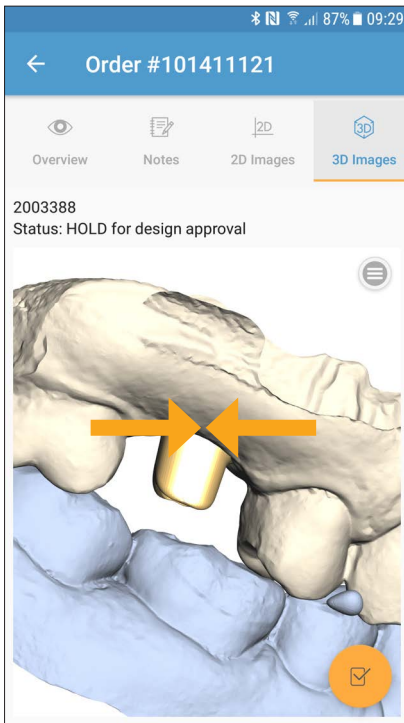

2. Navigieren in den 3D-Bildern:

- Zoomen:** Verwenden Sie zwei Finger in einer „Scherenbewegung“, um in das Bild ein- bzw. aus dem Bild auszuzoomen.
- Schwenken:** Verwenden Sie zwei Finger, um das Bild in die Richtung zu bewegen, in die Sie es schwenken möchten.
- Drehen:** Verwenden Sie einen Finger, um das Bild in eine gewünschte Richtung zu drehen.

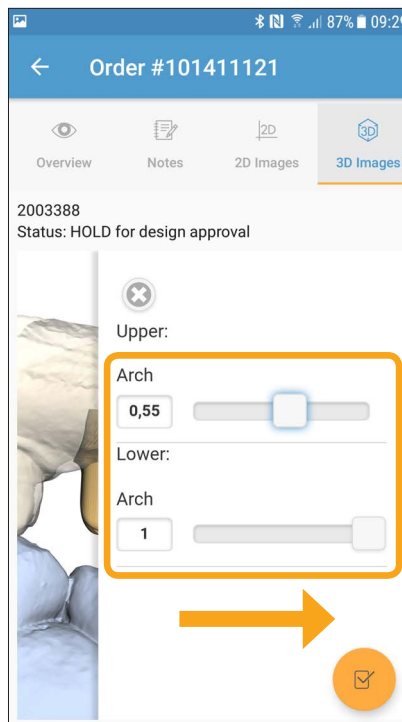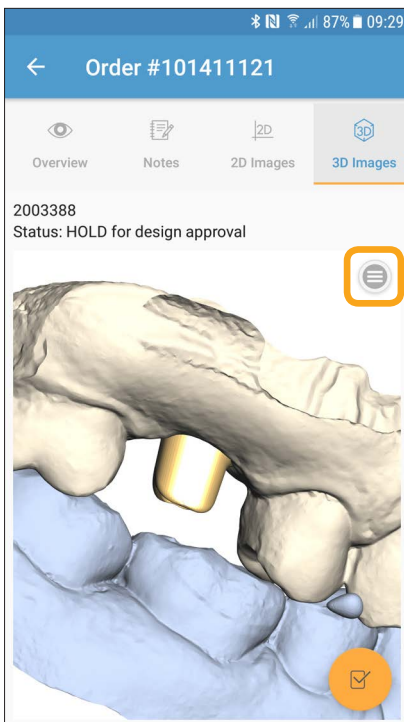


3. Transluzenz ändern

- Tippen Sie auf das Symbol in der rechten oberen Ecke. Mit Hilfe von Schiebereglern können Sie die Transluzenz der Wachsaufstellung sowie des OK- und UK-Modells zum gewünschten Wert ändern.
- Um zum Ansichtsmodus zurückzukehren, wischen Sie das Fenster einfach nach rechts.



Hinweis: Bearbeiten im 3D-Editor ist in der App nicht möglich. Designmodifikationen müssen im Atlantis Editor durch Einloggen in Ihr Atlantis WebOrder-Konto erfolgen. Anforderungen einer Designmodifikation können an den Atlantis-Konstrukteur auch über die Registerkarte „Notes“ (Anmerkungen) gesendet werden. Viewer-Ansichten sind außerdem nicht verfügbar für Atlantis-Suprastrukturen.

Anmerkungen für Designmodifikation senden

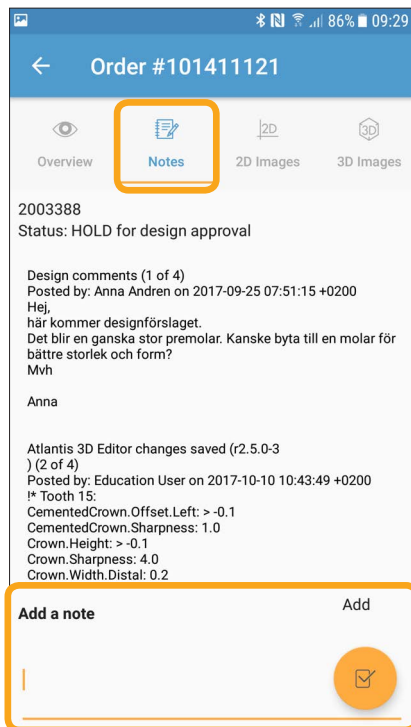

Anforderungen von Designmodifikationen können im Abschnitt „Notes“ (Anmerkungen) eingegeben werden. Tippen Sie auf „Add“ (Hinzufügen), um die Anmerkung an den Atlantis-Konstrukteur zu senden.

Fälle freigeben

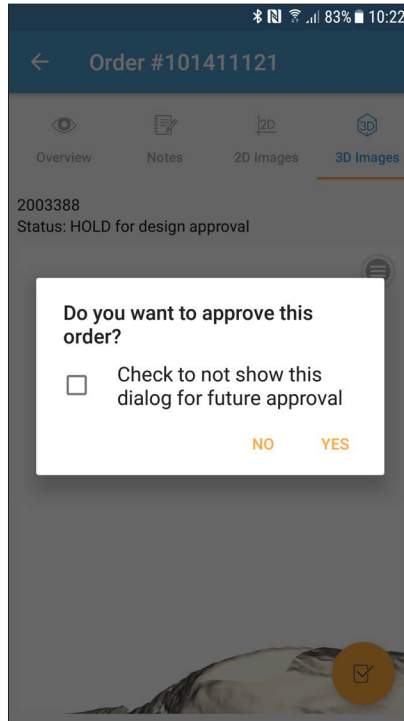
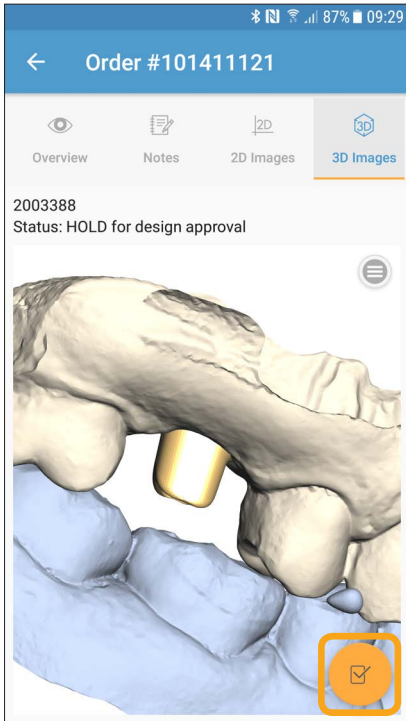


Während der Überprüfung eines Designs ist die Freigabe-Schaltfläche oben auf jeder Status-Registerkarte verfügbar.

Hinweis: Mit der Freigabe eines Falls startet sofort die Produktion (Fräsen).

Bitte geben sie keine Design-Vorschläge zur Produktion frei ohne diese überprüft zu haben.

Push-Benachrichtigungen

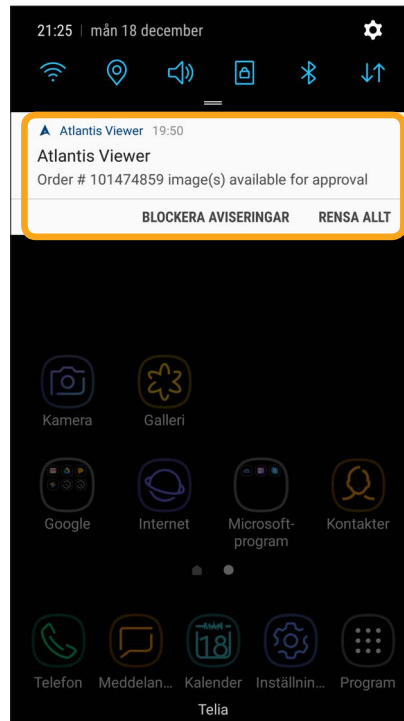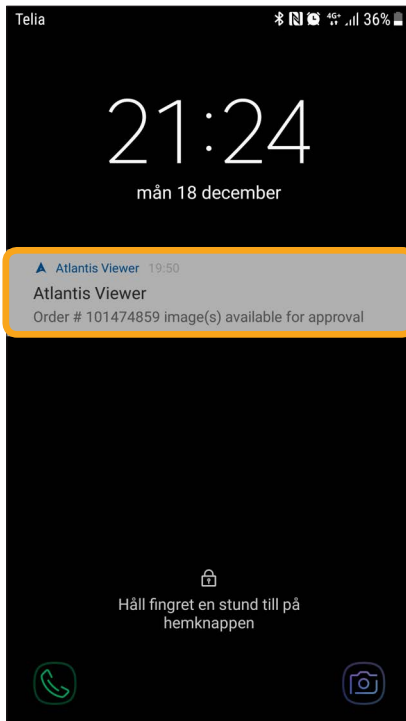

Sobald ein Fall für die Design-freigabe bereit ist, wird eine Push-Benachrichtigung an Ihr mobiles Gerät geschickt.

Hinweis: Abhängig von den Einstellungen können die Push-Benachrichtigungen je nach Gerät unterschiedlich angezeigt werden (weitere Informationen siehe „FAQ“, Seite 10).

FAQ

F: *Wie bearbeite ich die Abutments?*

A: In der App ist keine Bearbeitungsfunktion verfügbar, aber Design-Feedback kann in der Registerkarte „Notes“ (Anmerkungen) eingegeben werden, um eine Nachricht an den Atlantis-Konstrukteur zu senden. Wenn irgendwelche Designmodifikationen notwendig sind, loggen Sie sich mit Ihrem PC in Ihr Atlantis WebOrder-Konto ein, um den Atlantis 3D-Editor zu verwenden.

F: *Wenn ich auf 3D-Bilder klicke, passiert nichts. Warum?*


A: Abhängig von Ihrer Internetverbindung kann es ca. 10–60 Sekunden dauern, bis das Herunterladen des Falls abgeschlossen ist. Wenn es länger als eine Minute dauert, überprüfen Sie bitte Ihre Netzanbindung.

F: *Warum erhalte ich keine Push-Benachrichtigungen?*

A: Prüfen Sie zuerst, ob Ihr Konto in Atlantis WebOrder für den Empfang von E-Mails für Bilder eingerichtet ist. Es muss entweder „All orders entered“ (Alle eingegebenen Aufträge) oder „Orders entered by this user only“ (Nur von diesem Anwender eingegebene Aufträge) aktiviert sein:

The screenshot shows the 'Edit My Account' page with the following details:

- Navigation tabs: Orders, **My account**, Design profiles, Preferences
- Section: Edit My Account
- User Information (Atlantis WebOrder Account Manager):
 - First name*: Education
 - Last name*: User
 - Email*: awoeducation@dentsply.com
 - Time format: 23:59 (CET)
 - Time zone: (GMT+01:00) Copenhagen
- Preferences:
 - Send email notification for images:
 - None
 - Orders entered by this user only
 - All orders entered
- Abutment design image option:
 - 2D Only
 - Atlantis Editor (read only)
 - Atlantis Editor

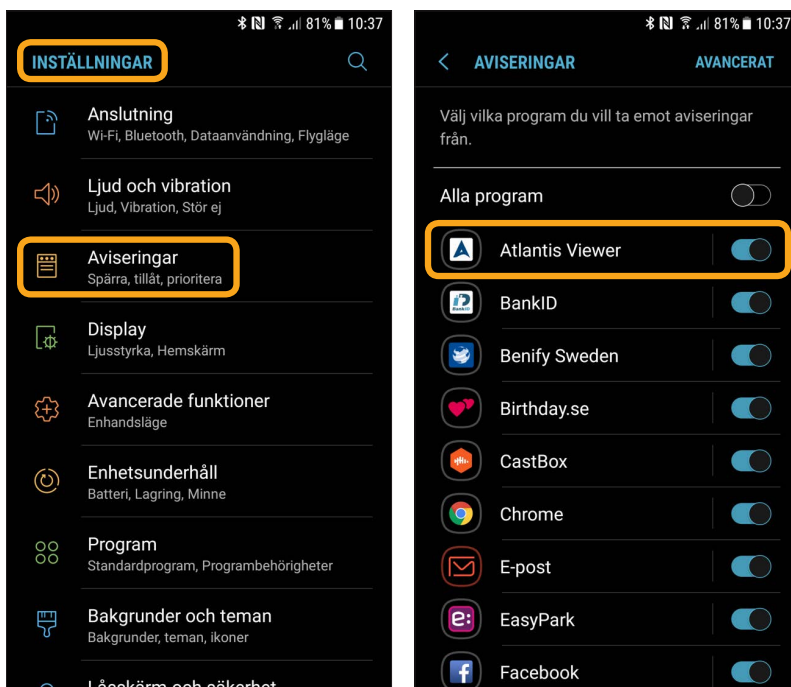

Überprüfen Sie zusätzlich, ob die Benachrichtigungs-Einstellung in Ihrem mobilen Gerät aktiviert ist, in dem Sie zu „Settings“ (Einstellungen)/„Notifications“ (Benachrichtigungen)/„Atlantis Viewer“ gehen.

Notizen

Notizen

Über Dentsply Sirona Implants

Dentsply Sirona Implants bietet umfassende Lösungen für alle Phasen der Implantattherapie an. Dazu gehören sowohl die Implantatsysteme Ankylos®, Astra Tech Implant System® und Xive® als auch digitale Technologien wie patientenindividuelle Lösungen mit Atlantis® sowie Simplant® für die computer-gestützte Implantologie.

Des Weiteren sind regenerative Lösungen mit Symbios®, Programme zur beruflichen Fortbildung und Weiterentwicklung sowie professionelle Marketingleistungen für Praxen und Labore unter der Marke STEPPS™ im Portfolio. Dentsply Sirona Implants schafft einen Mehrwert für Zahnärzte und Zahntechniker und ermöglicht vorhersagbare und dauerhafte Ergebnisse in der Implantatbehandlung, die zu einer höheren Lebensqualität für Patienten führen.

Weitere Informationen über Dentsply Sirona Implants finden Sie unter www.dentsplysirona.com/implants.

Hersteller: DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH · Postfach 71 01 11
68221 Mannheim/Deutschland · Tel. 0621 4302-000 · Fax 0621 4302-001
E-Mail: implants-info@dentsplysirona.com · www.dentsplysirona.com

Vertrieb Deutschland: DENTSPLY IH GmbH · Postfach 71 01 11
68221 Mannheim · Tel. 0621 4302-006 · Fax 0621 4302-007
E-Mail: implants-de-info@dentsplysirona.com · www.dentsplysirona.com

Vertrieb Österreich: Dentsply Sirona Europe GmbH · Zweigniederlassung Wien
Wienerbergstraße 11 / Turm A / 27. Stock · 1100 Wien
Tel. 01 600 4930-301 · Fax 01 600 4930-381
E-Mail: bestellung.austria@dentsplysirona.com

Vertrieb Schweiz: DENTSPLY IH SA · Rue Galilée 6, CEI 3, Y-Parc
1400 Yverdon-les-Bains · Tel. 0800 845844 · Fax: 0800 845845
E-Mail: implants-ch-info@dentsplysirona.com

Über Dentsply Sirona

Dentsply Sirona ist der weltweit größte Hersteller von Dentalprodukten und -technologien, mit einer 130-jährigen Unternehmensgeschichte, die von Innovationen und Service für die Dentalbranche und Patienten überall auf der Welt geprägt ist. Dentsply Sirona entwickelt, fertigt und vertreibt umfassende Lösungen, Produkte zur Zahn- und Mundgesundheit sowie medizinische Verbrauchsmaterialien, die Teil eines starken Markenportfolios sind.

Dentsply Sirona, The Dental Solutions Company™, liefert innovative und effektive, qualitativ hochwertige Lösungen, um die Patientenversorgung zu verbessern und für eine bessere, schnellere und sicherere Zahnheilkunde zu sorgen. Der weltweite Firmensitz des Unternehmens befindet sich in York (US-Bundesstaat Pennsylvania), und die internationale Zentrale ist in Salzburg (Österreich) angesiedelt. Die Aktien des Unternehmens sind an der NASDAQ unter dem Kürzel XRAY notiert.

Weitere Informationen über Dentsply Sirona und die Produktpalette finden Sie unter www.dentsplysirona.com.