



Atlantis®

## Ihr Praxispartner

Patientenindividuelle Lösungen  
für das Implantatsystem Ihrer Wahl

 **Dentsply  
Sirona**  
Implants

# Fortlaufende Innovation

Seit zwei Jahrzehnten werden kontinuierlich neue Atlantis-Produkte und -Dienstleistungen entwickelt, um den Bedürfnissen aller Mitglieder des Behandlungsteams gerecht zu werden – und natürlich zum Nutzen der Patienten.

**1999**

Erstes patientenindividuelles Atlantis Abutment aus Titan

**2004**

Atlantis Abutment aus goldfarbenem Titan

**2006**

Atlantis Abutment aus Zirkondioxid

**2008**

Atlantis Brücke und Atlantis Hybrid für verschraubte Lösungen

**2010**

Atlantis Editor für Atlantis Abutments

**2011**

Atlantis Crown-Abutment aus Zirkondioxid



**2005**

Atlantis Steg aus Titan

**2007**

Atlantis-WebOrder Online-Bestellsystem

**2009**

Laborseitiges Scannen steigert die Effizienz der Fallverarbeitung

**2014**

Atlantis Crown-  
Abutment in Titan



**2014**

Abgewinkelter  
Schraubenzugang für Atlantis-  
Brücke und Atlantis Hybrid



**2015**

Atlantis Conus-Konzept





**2016**

Atlantis Crown-Lösungen



**2014**

Intraorales Scannen für  
Atlantis Abutments

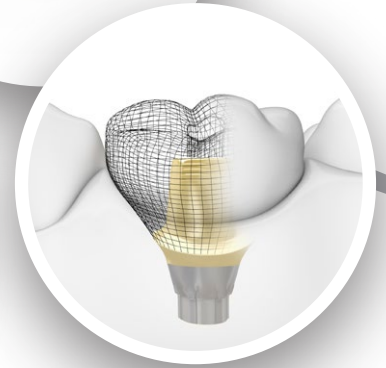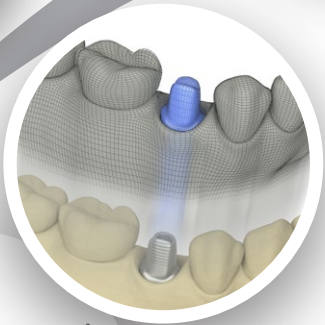

**2012**

Atlantis-CoreFile-Datensatz



**2015**

Im Additive Manufacturing-  
Verfahren hergestellte  
Atlantis Suprastrukturen

**2011**

Atlantis 2in1  
Suprastruktur

**2016**

Atlantis CustomBase-  
Lösungen



„Atlantis ist ein wesentliches Element meiner Praxis, und ich kann mich jeden Tag darauf verlassen. Damit konnte ich die Versorgung meiner Patienten verbessern, und ich bin von der Behandlung, die ich anbiere, voll und ganz überzeugt.“

Dr. Mark Montana, Prothetiker  
Tempe, AZ, USA

# Individuelle Abutments für individuelle Patientenanforderungen

Um wirklich optimale Lösungen anbieten zu können, benötigen Sie Vielseitigkeit in der Prothetik, Flexibilität in Ihrem Arbeitsablauf und Gestaltungsmöglichkeiten, die so individuell sind wie Ihre Patienten.

Mit patientenindividuellen Atlantis-Prothetiklösungen erhalten Sie diese Möglichkeiten sowie Ästhetik, Einfachheit und Zuverlässigkeit. Dies gibt Ihnen die erforderliche Grundlage, um der Individualität Ihrer Patienten gerecht zu werden.

## **Einfachheit, die Sie sich zunutze machen können**

Kann problemlos in Zahnarztpraxen und Dentallabore integriert werden, um Effizienz und Wirtschaftlichkeit zu steigern.

## **Freie Auswahl**


Eine offene Lösung für alle gängigen Implantatsysteme<sup>1</sup>, die einen reibungslosen Arbeitsablauf für jeden klinischen Fall bietet.

## **Ästhetik, auf die Sie sich verlassen können**

Durch den Einsatz unserer ausgereiften Design-Software, die auf der individuellen Anatomie jedes einzelnen Patienten basiert, werden alle notwendigen Designparameter berücksichtigt, um optimale Funktion und Ästhetik zu erzielen.

## **Zuverlässigkeit, der Sie vertrauen können**

Atlantis wurde auf einem soliden Fundament aus Forschung und Entwicklung geschaffen und ist durch langfristige Erfahrung und Dokumentation abgesichert, um eine Planbarkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. Und das Beste: Die patientenindividuellen Atlantis-Prothetiklösungen sind durch eine umfassende Garantie<sup>2</sup> abgedeckt, um Ihnen noch mehr Sicherheit zu bieten.

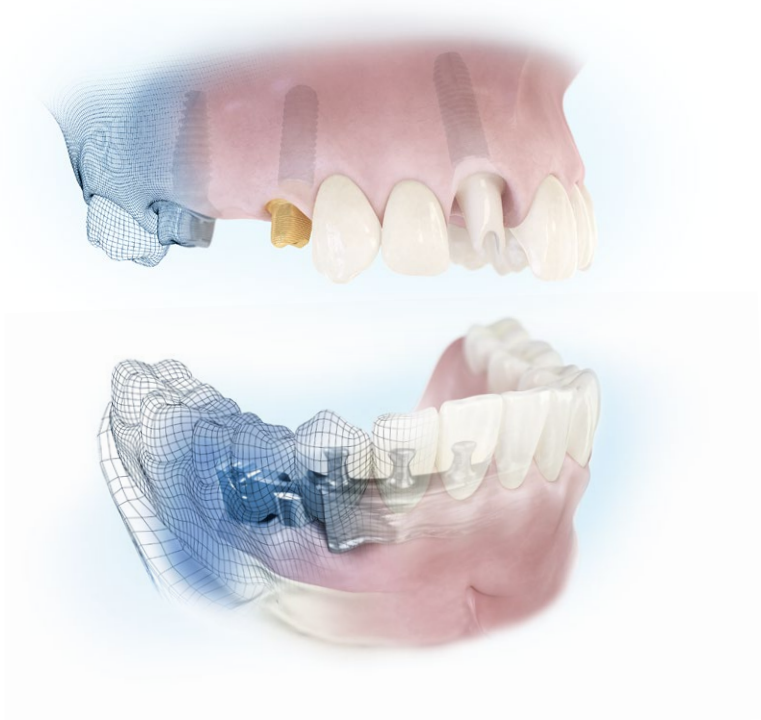

1. Siehe Atlantis Abutments- Übersicht zur Implantatkompatibilität
2. Gemäß den Bedingungen der Atlantis-Garantie

# Einfachheit, die Sie sich zunutze machen können

Mit Atlantis können Sie Ihr prothetisches Angebot um eine hochwertige Dimension erweitern. Jede patientenindividuelle Lösung wird optimal konstruiert und entsprechend Ihren Angaben hergestellt.

## **Einfache Bestellung**

Zahnärzte können einfach einen digitalen oder konventionellen Abdruck nehmen, die Fallmaterialien zusammen mit dem Fall-Auftragsformular an das Dentallabor senden und eine patientenindividuelle Atlantis-Lösung verordnen.

Zahntechniker können Atlantis-Lösungen online per Atlantis-WebOrder bestellen und zwar rund um die Uhr an allen sieben Wochentagen.

Digitale Abdrücke lassen sich über Atlantis-WebOrder oder mittels laborseitigem Scannen einfach vom Dentallabor an die Atlantis-Produktionsstätte senden. Modelle können auch sicher im Atlantis CaseSafe versendet werden.

## **Design nach Ihren Angaben**

Nach dem Erhalt des Online-Auftrags und der Arbeitsunterlagen übernehmen wir das Design Ihrer Abutments oder Suprastrukturen. Wir unterstützen dabei Ihren individuellen Ansatz bei der Versorgung Ihrer Patienten. Sie können sich voll und ganz auf die Atlantis Design-Software verlassen. Sie berücksichtigt sämtliche Aspekte der Designparameter und bezieht Ihre individuellen Anforderungen und Angaben mit ein. Noch vor der Herstellung und Qualitätskontrolle ermöglicht Atlantis eine vereinfachte Überprüfung und Freigabe der Designs.

## **Sofort eingliederbar**

Mit dem Ziel leichter Handhabung und größtmöglicher Präzision werden alle Atlantis-Lösungen basierend auf den individuellen Patientendaten konstruiert, überprüft und hergestellt. Damit entfällt die manuelle Nachbearbeitung vor der Eingliederung.

## **Maximale Effizienz**

Atlantis ermöglicht unabhängig vom bevorzugten Implantatsystem einheitliche Arbeitsabläufe bei allen Implantatversorgungen.

Diese Optimierung vereinfacht die Abläufe und steigert die Wirtschaftlichkeit der Zahnarztpraxis, da Zeit und Kosten für Lagerverwaltung, Wartung der Ausrüstung und Chairside-Änderungen entfallen. Darüber hinaus wachsen so die Kapazitäten im Dentallabor zur Bearbeitung weiterer Fälle.

## **Minimale Investitionen**

Atlantis ist ein offenes, vollkommen flexibles System, das sich problemlos an Ihre Bedürfnisse und Prozesse anpasst.

Zur Nutzung von Atlantis bedarf es keiner weiteren Investitionen in Software oder Geräte, ebenso entfallen entsprechende Kosten für Schulung und Wartung. Damit können Sie Ihr Arbeitsvolumen steigern, ohne Ihr Personal zusätzlichen Belastungen auszusetzen.

“Seit unserem Umstieg auf Atlantis  
Abutments hat sich unser Implantatgeschäft  
verdreifacht, weil wir unseren Kunden  
in immer konsistente, zuverlässige und  
qualitativ hochwertige Produkte und  
Dienstleistungen bieten können.”

Lars Hansson, CDT  
Bay View Dentallabor  
Chesapeake, VA, USA



Die digitalen Lösungen von Dentsply Sirona erleichtern es allen Mitgliedern des Behandlungsteams, miteinander in Kontakt zu treten. So werden Ihre Arbeitsabläufe rationalisiert, und Sie erhalten die erforderliche Grundlage, um der Individualität Ihrer Patienten gerecht zu werden

# Vereinfachter Workflow für Implantatlösungen



## **Abformung**

Wählen Sie zwischen herkömmlicher und digitaler\* Abformung.



## **Einfach zu verordnen**

Der Abdruck wird an das bevorzugte Dentallabor mit einer Verordnung für die ausgewählte Atlantis-Lösung geschickt.

\* Verfügbar für Atlantis Abutments





Die Nutzung von Atlantis-Lösungen optimiert den Workflow ohne Investitionen in zusätzliche Software oder Ausrüstung. Das Einsenden von intraoralen Scans, laborseitigen Scans oder Modellen ist integraler Bestandteil des offenen digitalen Workflows.

Die Vernetzung aller Beteiligten erstreckt sich sowohl auf die Planungs- als auch die Behandlungsphase und verbessert zudem

die Partnerschaft mit unseren Kunden sowie die Kommunikation innerhalb Ihres gesamten Behandlungsteams.

Eine unserer wichtigsten Prioritäten besteht darin, sicherzustellen, dass wir stets zuverlässige Lösungen, Produkte und Dienstleistungen von höchster Qualität liefern. Die Vernetzung sorgt außerdem dafür, dass Sie immer genau das bekommen, was Sie erwarten.

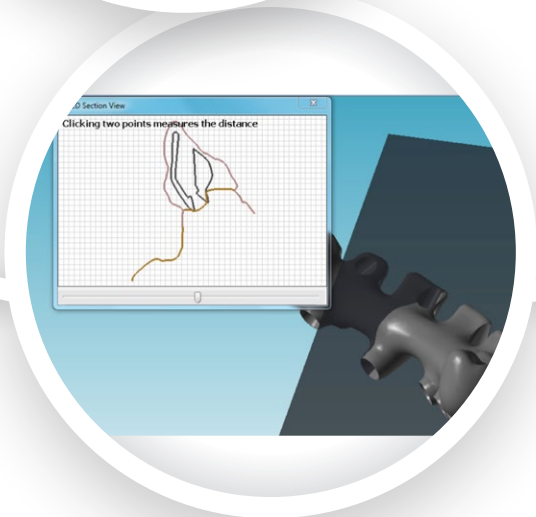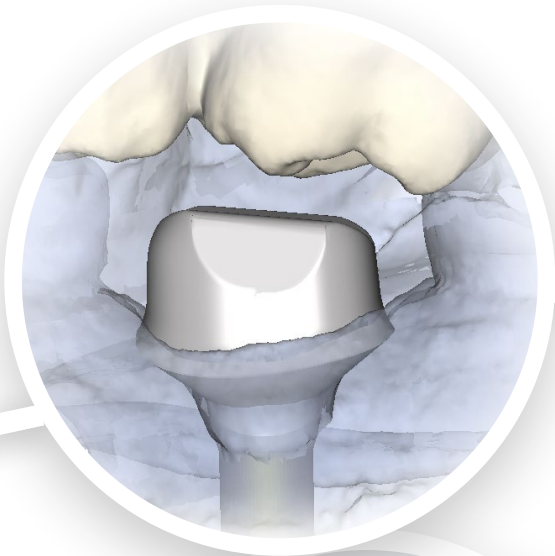

### **Design- und Kundenfreigabe**

Die Bestellung wird vom Zahntechniker abgeschlossen und an Dentsply Sirona zum Design und zur Herstellung gesendet. Das Behandlungsteam kann das Design vor der Produktion einfach überwachen, ansehen und freigeben.

### **Fertige patientenindividuelle Lösung**

Nach der Fertigung werden die patientenindividuellen Atlantis Abutments an das Labor gesendet, das die Versorgung fertigstellt und an den Zahnarzt schickt.

„Als Prothetiker nutze ich für meine  
Versorgungen die unterschiedlichsten  
Implantatsysteme. Mit den Atlantis-  
Lösungen muss ich weniger Teile  
vorrätig haben, weil alle Implantate  
in gleicher Weise versorgt werden.“

Dr. Michael Johnson, Prothetiker,  
Bellevue, WA, USA



# Freie Auswahl

Mit Atlantis erhalten Sie eine offene digitale Lösung, die Ihnen größtmögliche Flexibilität für Ihre implantatgestützten Versorgungsbedürfnisse bietet.

## **Für alle Mitglieder des Behandlungsteams**

Unabhängig davon, ob Sie Zahnarzt oder Zahntechniker sind: Atlantis lässt sich ganz einfach in Ihre bevorzugte Arbeitsweise integrieren. Dies erleichtert die Kommunikation im Team und erhöht die Wirtschaftlichkeit.

## **So digital, wie Sie es wünschen**

Atlantis hilft bei der Schaffung eines vollständig digitalen Workflows. Zahnärzte können mithilfe von intraoralen Scannern<sup>1</sup> digitale Abdrücke nehmen und so mehr Effizienz und Komfort bieten, während Zahntechniker ihre bereits getätigten Investitionen weiter nutzen können, indem sie vorhandene Scanner zur Digitalisierung des gesamten Falls einsetzen. Wenn Sie einen analogen Workflow bevorzugen, können die Fallmaterialien auch zum Scannen an das Dentallabor geschickt werden.

## **Für die von Ihnen benötigten Materialien**

Atlantis-Lösungen sind für die von Ihnen gewünschten und benötigten Materialien verfügbar – für alle Indikationen. Mit Titan, goldfarbenem Titan oder Zirkondioxid in unterschiedlichen Farbtönen für die Abutments und Kronen sowie Titan und Kobalt-Chrom für die Suprastrukturen können Sie die funktionalen und ästhetischen Anforderungen in jedem Patientenfall erfüllen.

## **Zahlreiche Designoptionen**

Ergänzend zur Materialauswahl stehen zahlreiche Designoptionen zur Verfügung, darunter Alternativen für die optimale Durchtrittsbreite, endgültige Retentionsoberfläche und Positionierung mit abgewinkeltem Schraubenzugang für Brücken und Hybridstrukturen.

## **Für alle gängigen Implantatsysteme<sup>2</sup>**

Atlantis ist kompatibel mit einem breiten Portfolio an Implantatverbindungen, was bedeutet, dass Sie weiter mit Ihren bevorzugten Implantatsystemen arbeiten können.



Atlantis-Lösungen – für das Implantatsystem Ihrer Wahl

1. Verfügbar für Atlantis Abutments  
2. Siehe Atlantis – Übersicht der Implantatkompatibilität  
Alle Marken, Firmennamen und Implantatdesigns sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

„Ich versorge meine Patienten nun schon seit sechs Jahren mit den Atlantis Abutments. Ich bin sehr zufrieden mit der hohen Qualität und Prognostizierbarkeit in diesem kritischen Bereich der Implantologie.

Atlantis Abutments bieten eine ideale und effiziente Lösung für meine Patienten, meine überweisenden Zahnärzte und unsere Praxis!“

Dr. Scott Keith, Prothetiker  
Walnut Creek, CA, USA

# Ästhetik, auf die Sie sich verlassen können

Unsere Zähne sind so verschieden und individuell wie unser Fingerabdruck. Deshalb sollten auch die Zahnversorgungen, die jeder Patient erhält, ganz individuell sein.

Das Design aller Atlantis-Lösungen basiert auf der individuellen Anatomie und klinischen Situation jedes einzelnen Patienten, auf dem Einsatz

moderner und ausgereifter Design-Software und der Berücksichtigung Ihrer Design-Vorgaben.

Mit diesem flexiblen und lösungsbasierten Ansatz wird ein Ergebnis erzielt, das dem natürlichen Zahn in Bezug auf Funktion und Ästhetik in nichts nachsteht.


## Atlantis® Abutments



Atlantis Abutments werden den Anforderungen und Angaben des Patienten nach hervorragender Funktion und Ästhetik gerecht. Für jedes Atlantis Abutment wird der Präparationsverlauf ideal gestaltet und ermöglicht eine einfache und sichere Entfernung von überschüssigem Zement. Auf diese Weise ist eine einfache Handhabung mit kürzeren Behandlungszeiten und dauerhaft ästhetischen Ergebnissen gewährleistet.

*Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Roy Samuelsson,  
Dr. Johan Caspar Wohlfahrt und Svein Thorstensen, MDT*

## Atlantis® Suprastrukturen

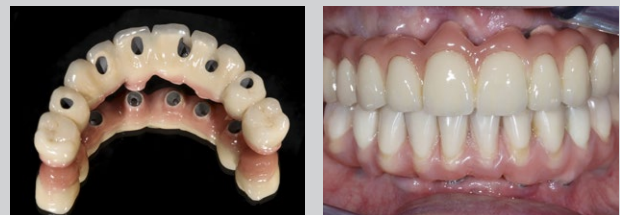

Atlantis Suprastrukturen bieten die Lösungen, die Sie zur Versorgung von teil- und unbezahnten Kiefern sowie für Ihre Patientenanforderungen und die individuellen Vorgaben hinsichtlich funktioneller Eigenschaften und Ästhetik benötigen. Bei Atlantis Brücken- und Hybrid-Versorgungen kann der Schraubkanal ausgerichtet werden, und der Zugang zur Prothetikschaube lässt sich optimal positionieren, wodurch Funktion sowie Ästhetik verbessert werden.

*Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Sissel Heggdalsvik,  
Dr. Per-Johan Halvorsen und Svein Thorstensen, MDT*





# Lösungen für Ihre verschiedenen Bedürfnisse

Atlantis bietet ein umfassendes Sortiment an patientenindividuellen Prothetiklösungen für sämtliche Indikationen und alle gängigen Implantatsysteme<sup>1</sup> und wird damit den Anforderungen Ihrer Patienten hinsichtlich exzellenter Funktion und Ästhetik gerecht.



## Zementierte Lösungen

Atlantis Abutments und Atlantis Crowns werden patientenindividuell für zementierte Lösungen gefertigt. Die ideale Gestaltung des Präparationsverlaufs ermöglicht eine einfache und sichere Entfernung von überschüssigem Zement. Darüber hinaus gewährleistet der Atlantis Übertragungsschlüssel die Präzision beim Ausrichten und Einsetzen der Atlantis Abutments für Einzelzahn- und mehrgliedrige zementierte Versorgungen in Verbindung mit allen gängigen Implantatsystemen.<sup>1</sup>

1. Siehe Atlantis Abutments - Übersicht zur Implantatkompatibilität.



## Friktions- und implantatgestützte Lösungen

Atlantis Conus-Abutment ist ein individuell angefertigter, konisch geformtes Aufbau, der in Verbindung mit den präfabrizierten SynCone-Kappen das Atlantis Conus-Konzept bildet. Mit diesem Konzept erhalten Ihre Patienten eine stabile herausnehmbare Prothese mit dem Erscheinungsbild und der Sicherheit eines festsitzenden Zahnersatzes.

Atlantis 2in1 bietet sowohl eine mit den Implantaten verschraubte Primärstruktur als auch eine Sekundärstruktur, die durch Friktion und zusätzliche Halteelemente auf der Primärstruktur befestigt ist.

Der Atlantis Steg ist für herausnehmbare Prothesen vorgesehen und kann eine Kombination unterschiedlicher Halteelemente enthalten.




## Verschraubte Lösungen

Atlantis Brücke und Atlantis Hybrid sind reduzierte anatomische Gerüste, die durch Keramik-, Komposit-Schichttechnik oder Prothesenkunststoff vervollständigt werden.


Die Atlantis CustomBase-Lösungen für die Einzelzahnversorgung kombinieren ein patientenindividuelles Atlantis Abutment und eine Atlantis Crown bzw. Crown File/Core File (Datensatz) mit dem bereits angegebenen Schraubkanal. Die Lösung wird extraoral zementiert und in das Implantat verschraubt. Im Vergleich zu einer standardmäßigen titanbasierenden Komponente bietet die Atlantis CustomBase-Lösung ein individuelles Emergenzprofil für Weichgewebes-Ästhetik sowie Flexibilität beim Material von Abutments und Kronen.

Das Atlantis Crown-Abutment ermöglicht eine direkte Verblendung mit Keramik bzw. Kunststoff und bietet bestmögliche Funktion und Ästhetik für verschraubte Einzelzahnversorgungen.

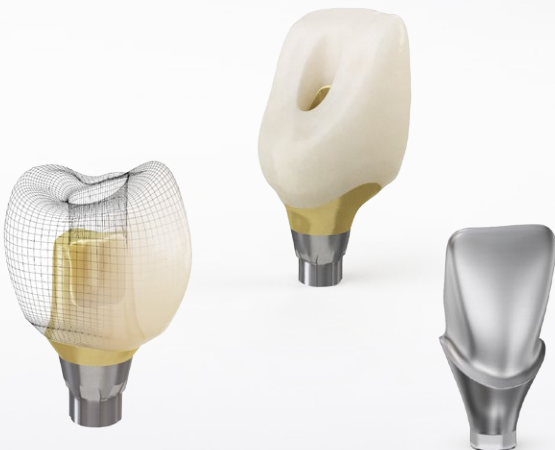


# Patientenindividuelle Atlantis® Abutments und Kronen


Atlantis Abutments werden ausgehend von der endgültigen Zahnform mithilfe der passenden Design-Software Virtual Atlantis Design (VAD) individuell design. Die Software berücksichtigt die anatomischen Gegebenheiten der spezifischen Zahnlücke, der benachbarten Zähne und des Weichgewebes und erzielt ein prothetisches Ergebnis, das dem natürlichen Zahn in Bezug auf Funktion und Ästhetik in nichts nachsteht.

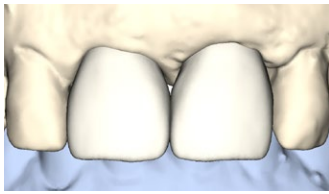

Vorgeschlagene Zahnform

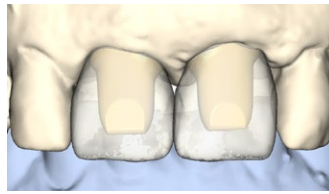

Das Abutmentdesign berücksichtigt alle wichtigen Faktoren

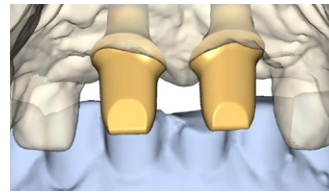

Finales Atlantis-Abutmentdesign

Die Atlantis Abutments sind für alle Positionen im Mund indiziert: für zementierte Lösungen, verschraubte und friktiv haftend Lösungen (Einzelzahn) und implantatgestützte Deckprothesen zur Versorgung bei Einzelzahnlücken, teilbezahntem oder zahnlosem Kiefer für alle gängigen Implantatsysteme.<sup>1</sup>

Atlantis Crown ist für zementierte Lösungen und als Teil der Atlantis CustomBase-Lösung für verschraubte Lösungen verfügbar. Die Krone wird zur selben Zeit wie das entsprechende patientenindividuelle Atlantis Abutment bestellt und geliefert.

Damit Sie die funktionalen und ästhetischen Anforderungen Ihrer Patienten erfüllen können, sind die Atlantis Abutments und Kronen in unterschiedlichen biokompatiblen Materialien erhältlich, darunter Titan, goldfarbenes Titan und Zirkondioxid in verschiedenen Farbtönen.



Zementierte Lösungen




Verschraubte Lösungen


## Situation des Kunden

Um optimale funktionale und ästhetische Ergebnisse zu erzielen, müssen verschiedene Parameter berücksichtigt werden, z. B. Implantatdurchmesser, Größe des Durchtrittsprofils, Position der Präparationsgrenze und Auswahl des endgültigen Versorgungstyps.


Bei Verwendung von Atlantis Abutments genießen Sie die Flexibilität der prothetischen Versorgung mit dem von Ihnen bevorzugten Implantatsystem. Sie haben die Wahl aus mehreren Optionen für die Durchtrittsbreite und können die Position der Präparationsgrenze festlegen.

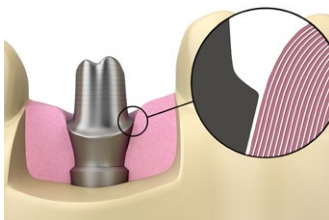

Keine Schleimhautverdrängung

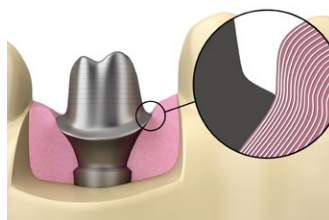

Kontur des Gewebes

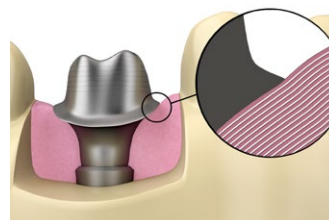


Anatomische Unterstützung

1. Siehe Atlantis Abutments - Übersicht zur Implantatkompatibilität



## Atlantis® BioDesign Matrix

Bei der Atlantis BioDesign Matrix wirken die Synergien von vier einzigartigen Merkmalen, was das Design und die Fertigung von patientenindividuellen Abutments gleichbleibend hoher Qualität für alle gängigen Implantatsysteme ermöglicht

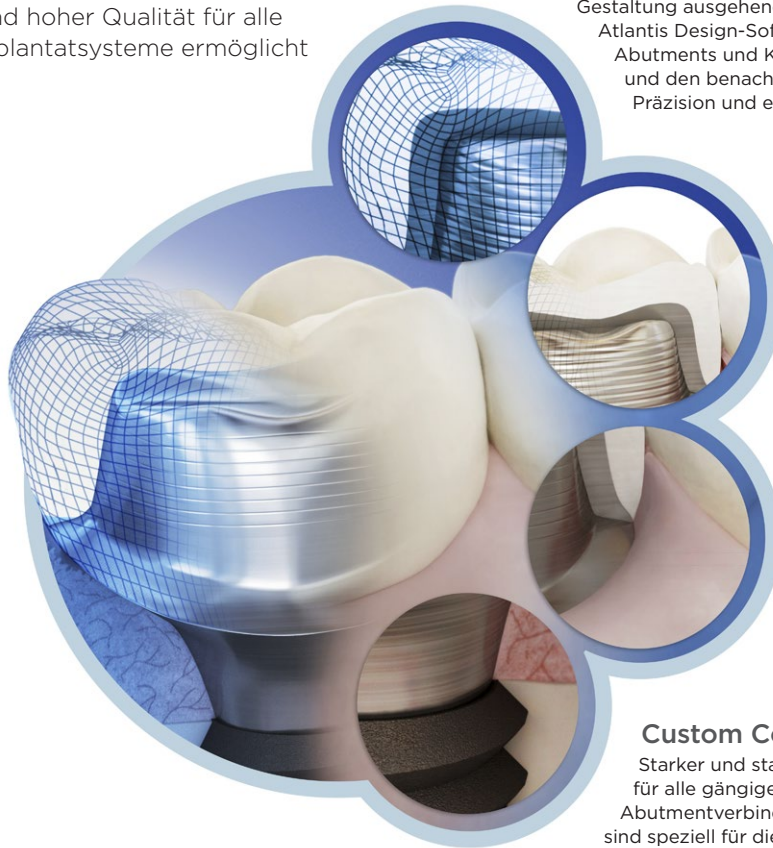

### Virtual Atlantis® Design

Gestaltung ausgehend von der endgültigen Zahnform. Die Virtual Atlantis Design-Software (VAD) ermöglicht das Design von Abutments und Kronen in Relation zum unbezahnten Bereich und den benachbarten Zähnen und sorgt so für hohe Präzision und eine natürlichere Ästhetik.

### Natural Shape

Die einzigartige anatomische Formgebung und das Durchtrittsprofil fördern das Weichgewebsmanagement und bieten so optimale Unterstützung und stabilen Halt für die endgültige Versorgung.

### Soft-Tissue Adapt

Das Zusammenspiel von biologischen, anatomischen und technischen Parametern schafft günstige Bedingungen für den Heilungsprozess des Weichgewebes und dessen Anpassung an die fertige Krone.

### Custom Connect

Starker und stabiler Halt – individuelle Verbindung für alle gängigen Implantatsysteme. Atlantis Abutmentverbindungen und Abutmentschrauben sind speziell für die verschiedenen Implantatanschlüsse entwickelt und getestet und sorgen somit für präzise Passung, Stabilität und das angestrebte Ergebnis.

## Atlantis® Abutments



Ausgehend von Implantatposition, Durchtrittsprofil und den vom Zahnarzt präferierten Optionen für die Durchtrittsbreite wird das patientenindividuelle Abutment von Dentsply Sirona hergestellt und vom Zahntechniker geprüft und bearbeitet. Der subgingivale Abschnitt des Abutments weist eine anatomische Form auf, die das umgebende Weichgewebe unterstützt.

Nach sechs Jahren zeigt eine Röntgenaufnahme den perfekten Sitz der Versorgung. Die interproximalen Papillen sind stabil geblieben, und die Position des Knochens liegt auf gleicher Höhe wie das Implantat. Das Weichgewebe um die Versorgung, das den Interdentalraum füllt, trägt zu einer natürlichen Weichgewebekontur bei.

Mit freundlicher Genehmigung von Fernando Rojas-Vizcaya, DDS, MS und Francisco Ortega, CDT



#### **Additive Manufacturing**


„Additive Manufacturing“ ist eine 3D-Fertigungstechnik für Metalle, die neue Möglichkeiten für komplexe Geometrien eröffnet.

# Patientenindividuelle Atlantis<sup>®</sup> Suprastrukturen

Atlantis Suprastrukturen werden unter Verwendung neuester Entwicklungen in führenden Produktionstechnologien gefertigt und durch die Erfahrungen aus der Industrie und Zahnmedizin unterstützt.

Der zahntechnisch-künstlerische Aspekt von Herstellverfahren im Dentallabor wird durch die Anwendung von ingenieurwissenschaftlichen Parametern verbessert. Dies ermöglicht die Konstruktion und Fertigung patientenindividueller Implantat-Suprastrukturen in gleichbleibender und hoher Qualität für alle gängigen Implantatsysteme.

## **Atlantis<sup>®</sup> Suprastrukturen**

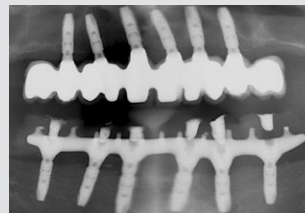

Die Platzierung von Implantaten erfordert Restaurationslösungen, die so gestaltet sind, dass eine optimale Funktion erreicht und hohe ästhetische Anforderungen erfüllt werden. Unter Verwendung des erstellten Zahn-Set-Ups werden die Implantat-Suprastrukturen mit Hilfe neuester Entwicklungen in Produktionstechnologien konstruiert. Atlantis Implantat-Suprastrukturen können für die endgültige Versorgungslösung auch

gestaltet werden, wenn die Bedingungen für eine Implantatplatzierung nicht ideal sind. Die Röntgenaufnahme zeigt einen zahnlosen Kiefer mit einer Atlantis Implantatversorgung mit passivem Sitz. Die endgültige Lösung besteht aus einer Atlantis Brücke im Oberkiefer und einem Atlantis Hybrid im Unterkiefer für eine bestmögliche Funktion und ein optimales ästhetisches Ergebnis.

„Die Technologie entwickelt sich ständig weiter, und Atlantis bietet jedem Labor den Wettbewerbsvorteil, der sich durch die Gestaltung und Fertigung von Atlantis Abutments und Atlantis Suprastrukturen ergibt, ohne dass dazu große Investitionen in Technologien erforderlich wären.“

Lars Hansson, CDT  
Bay View Dentallabor  
Chesapeake, VA, USA

### Prothetische Flexibilität

Atlantis Suprastrukturen umfassen ein breites Sortiment an Suprastrukturen für implantatgestützten Zahnersatz und Deckprothesen in festsitzender Form (Atlantis Brücke und Atlantis Hybrid) und herausnehmbarer Form (Atlantis 2in1 und Atlantis Steg).

### Erstklassige Fertigung

Atlantis Brücke und Atlantis Hybrid werden mit „Additive Manufacturing“ hergestellt. Diese 3D-Fertigungstechnik für Metalle eröffnet einzigartige Möglichkeiten für komplexe Geometrien. Das Ergebnis ist ein ultimatives Design der Suprastrukturen aus Titan und Kobalt-Chrom für alle gängigen Implantatsysteme<sup>1</sup>.



Atlantis Brücke für festsitzende Versorgung



Atlantis Hybrid für festsitzende Versorgung



Atlantis 2in1 für herausnehmbaren Zahnersatz




Atlantis Hybrid für herausnehmbaren Zahnersatz

### Abgewinkelter Schraubenzugang

Im Hinblick auf eine optimale Funktion und Ästhetik kann der Kanal für die Prothetikschaube dank des abgewinkelten Schraubenzugangs mit einer Neigung von bis zu **30 Grad** zur Implantat-Abutmentachse variiert werden.

1. Siehe Atlantis Abutments - Übersicht zur Implantatkompatibilität





„Durch den Umstieg auf Digitaltechnik sind wir nicht eingeschränkt und können die besten Lösungen für unseren Workflow verwenden. Wir mögen den volldigitalen Workflow und werden noch viele weitere abdrucklose Atlantis-Fälle abwickeln.“

Mr. Steve Campbell, CDT, Nexus Dental, Harrogate, Großbritannien  
und Dr. Tim Doswell, BChD Dip.Imp.Dent.RCS (Eng) (Adv.Cert),  
Raglan Suite, Harrogate, Großbritannien

# Immer in Verbindung

Dentsply Sirona bietet digitale Lösungen, die es allen Beteiligten erleichtern, miteinander in Kontakt zu treten. Die Arbeitsabläufe werden dadurch bei all Ihren Versorgungsgängen schneller und effizienter.

Diese Verbindung ist ein Ergebnis unseres Engagements für konsistente, zuverlässige und qualitativ hochwertige Lösungen und Dienstleistungen. Sie erstreckt sich sowohl auf die Planungs- als auch die Behandlungsphase und fördert zudem die Partnerschaft zwischen Dentsply Sirona und unseren Kunden sowie die Beziehung der Behandlungsteammitglieder untereinander. Die Vernetzung aller Beteiligten sorgt außerdem dafür, dass Sie immer genau das bekommen, was Sie erwarten.



„Unser Dentallabor versorgt inzwischen seit über 10 Jahren Fälle mit Atlantis Abutments. Die Ergebnisse waren immer hervorragend und sind es auch noch heute. Mit mehr als 30.000 versorgten Fällen und einem Ersatzfaktor von unter 2 % ist unser Simpl™ Protokoll mit der Verwendung von Atlantis Abutments bis heute unser erfolgreichstes Angebot.

Ohne den hervorragenden Design- und Service-Support hätten wir diese tollen Ergebnisse niemals erreichen können. Wir sind begeistert von der Partnerschaft zwischen unserem Labor und dem Anbieter. Die Ergebnisse sprechen für sich. Vielen Dank!“

Barry Lampert, Eigentümer der  
Town & Country Dental Studios  
Freeport, NY, USA

# Zuverlässigkeit, der Sie vertrauen können

Mit Ihrer Entscheidung für Atlantis können Sie ganz sicher sein, dass die Prothetiklösungen, die Sie erhalten werden, höchsten Maßstäben in Sachen Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit gerecht werden. Und deshalb sind die patientenindividuellen Atlantis-Prothetiklösungen auch durch ein exklusives und branchenweit führendes umfassendes Garantieprogramm abgedeckt.

## **Einzigartige Design-Erfahrungen**

Unser Vertrauen basiert auf unserer umfangreichen Design-Erfahrung und auf dem weltweiten Verkauf von über eineinhalb Millionen Atlantis Abutments sowie über einer halben Million Atlantis Suprastrukturen.

## **Umfassende Forschung und Entwicklung**

Die Atlantis-Produkte und -Dienstleistungen werden durch viele Jahre der Forschung und des Gebrauchs, durch ständige Verbesserungen bei Produktion und Fertigung sowie durch branchenweit führende Innovationen gestützt.

## **Hochpräzise Produktionstechnologien**

Die patientenindividuellen Atlantis-Prothetiklösungen werden in einer der modernsten Produktionseinrichtungen hergestellt und auf Qualität geprüft. Diese Einrichtungen besitzen die ISO-Zertifizierung und werden regelmäßig auf Produktionsqualität und Effizienz überprüft.

## **Umfassende Garantie**

Jedes ausgelieferte Atlantis-Produkt ist durch eine umfassende Garantie<sup>1</sup> abgedeckt, um Ihnen noch mehr Sicherheit zu bieten.

1. Gemäß den Bedingungen der Atlantis-Garantie



SECURITY  
LAW MEMBER

## Über Dentsply Sirona Implants

Dentsply Sirona Implants bietet umfassende Lösungen für alle Phasen der Implantattherapie an. Dazu gehören sowohl die Implantatsysteme Ankylos®, Astra Tech Implant System® und Xive® als auch digitale Technologien wie patientenindividuelle CAD-/CAM-Lösungen mit Atlantis® und Simplant® für die computergestützte Implantologie. Des Weiteren sind regenerative Lösungen mit Symbios®, Programme zur beruflichen Fortbildung und Weiterentwicklung sowie professionelle Marketingleistungen für Praxen und Labore unter der Marke STEPPS™ im Portfolio. Dentsply Sirona Implants schafft einen Mehrwert für Zahnärzte und Zahntechniker und ermöglicht vorhersagbare und dauerhafte Ergebnisse in der Implantatbehandlung, die zu einer höheren Lebensqualität für Patienten führen.

## Über Dentsply Sirona

Dentsply Sirona ist der weltweit größte Hersteller von Dentalprodukten und -technologien, mit einer 130-jährigen Unternehmensgeschichte, die von Innovationen und Service für die Dentalbranche und ihre Patienten überall auf der Welt geprägt ist. Dentsply Sirona entwickelt, fertigt und vertreibt umfassende Lösungen, Produkte zur Zahn- und Mundgesundheit sowie medizinische Verbrauchsmaterialien, die Teil eines starken Markenportfolios sind.

Dentsply Sirona, The Dental Solutions Company™, bietet innovative und effektive, qualitativ hochwertige Lösungen, um die Patientenversorgung zu verbessern und für eine bessere, sicherere und schnellere Zahnheilkunde zu sorgen. Der weltweite Firmensitz des Unternehmens befindet sich in York, Pennsylvania, und die internationale Zentrale ist in Salzburg, Österreich, angesiedelt. Die Aktien des Unternehmens sind in den Vereinigten Staaten an der NASDAQ unter dem Kürzel XRAY notiert.

Weitere Informationen Dentsply Sirona und seine Produkte finden Sie unter [www.dentsplysirona.de](http://www.dentsplysirona.de).