
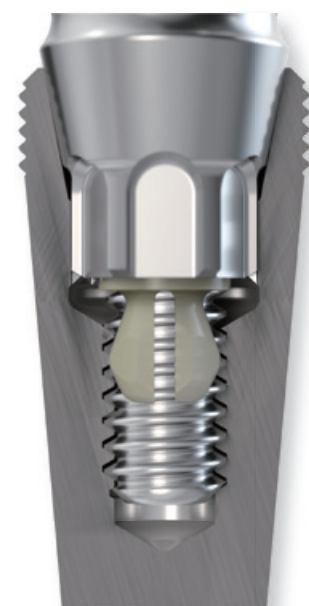


## プロダクトニュース April 2022

### Implant Driver EV

**NEW****4月15日(金) 新発売**

インプラントが安全にピックアップできます。

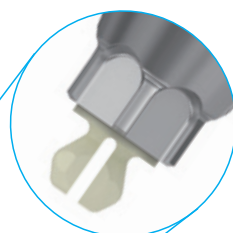

#### 特長

- PEEK チップが装着され、インプラントを安全にピックアップできます。
- アストラテックインプラント EV に使用可能です。
- 保持力は、インプラントに差し込む強さに依存しません。
- 約100回繰り返し使用可能。

#### 洗浄の際の手順と注意事項

1. 使用後、汚れは2時間以内に柔らかいナイロンブラシで取り除いてください。
2. **超音波洗浄を使用しないでください。**
3. ドライバーを他の器具 / ドリルと同じ容器やバスケットに入れて洗浄しないようにしてください。
4. ウォッシャーディスインフェクターを使用する場合は、他の器具と接触しないように注意してください。
5. 外科用トレイに装着せず、別々に洗浄してください。



# インプラント ドライバー EV

ショート



S



M



L

全長 mm	22.9	23.0	23.1
商品コード	68015188	68015190	68015192
価 格	9,500	9,500	9,500

## インプラント ドライバー EV

ステンレス製、PEEK プラスチック、未滅菌

- インプラントのピックアップおよび埋入用
- カラーコードによる識別
- 埋入深度と接続のサイズがマーキング
- 位置の確認を容易にするためのディンプル

注意：コントラアングルまたはサージカルドライバー  
ハンドルに装着しトルクレンチ EV とともに使用

ロング



S




M



L

全長 mm	33.0	33.2	33.3
商品コード	68015189	68015191	68015193
価 格	9,500	9,500	9,500

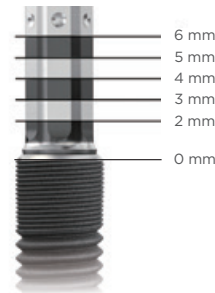

深度マーキングの  
基準点 (O) は目的の  
骨レベル (ベベル  
最下点) です。

# アストラテックインプラントプロファイルドライバー

ショート

PM

ロング

PM

ショート

PL

ロング

PL

全長 mm	23.0	33.0	23.0	33.0
商品コード	68015261	68015262	68015263	68015264
価 格	9,500	9,500	9,500	9,500

## 使用可能インプラントリスト

商品コード	商品名	使用可能インプラント
68015187	インプラントドライバー EV (XS) ロング	アストラテックインプラント EV3.0S
68015188	インプラントドライバー EV (S) ショート	アストラテックインプラント EV3.6S
68015189	インプラントドライバー EV (S) ロング	アストラテックインプラント EV3.6S
68015190	インプラントドライバー EV (M) ショート	アストラテックインプラント EV4.2S、4.2C
68015191	インプラントドライバー EV (M) ロング	アストラテックインプラント EV4.2S、4.2C
68015192	インプラントドライバー EV (L) ショート	アストラテックインプラント EV4.8S、4.8C
68015193	インプラントドライバー EV (L) ロング	アストラテックインプラント EV4.8S、4.8C
68015194	インプラントドライバー EV (XL) ショート	アストラテックインプラント EV5.4S
68015195	インプラントドライバー EV (XL) ロング	アストラテックインプラント EV5.4S
68015261	アストラテックインプラントプロファイルドライバー (PM) ショート	アストラテックインプラント EV プロファイル 4.2S、4.2C
68015262	アストラテックインプラントプロファイルドライバー (PM) ロング	アストラテックインプラント EV プロファイル 4.2S、4.2C
68015263	アストラテックインプラントプロファイルドライバー (PL) ショート	アストラテックインプラント EV プロファイル 4.8S、4.8C
68015264	アストラテックインプラントプロファイルドライバー (PL) ロング	アストラテックインプラント EV プロファイル 4.8S、4.8C

販売名：インプラントドライバー EV

一般的名称：ドライバ及び抜出器

届出番号：13B1X10236Y05640

クラス分類：I

販売名：オッセオスピード EV

一般的名称：歯科用インプラントシステム

承認番号：22800BZX00381000

クラス分類：III

販売名：オッセオスピード プロファイル EV

一般的名称：歯科用インプラントシステム

承認番号：22900BZX00322000

クラス分類：III